


¿Qué es el procedimiento de FemVue?

La ecografía se usa antes del procedimiento de FemVue y durante él, y comienza cuando la sonda se coloca en la vagina.

Primero, se evalúan la forma y el contorno del útero para detectar posibles problemas.

Luego, el dispositivo FemVue libera una sustancia salina y aire a través de un catéter fino de balón que se coloca en la cavidad uterina.

La sustancia salina natural y las "burbujas" de aire permiten que su médico determine si las trompas están abiertas o bloqueadas, y podrá compartir los resultados con usted durante esta visita.



Sustancia salina natural y "burbujas" de aire

FemVue es una prueba de diagnóstico que se puede realizar en el consultorio

y permite que su médico determine si las trompas de Falopio están abiertas o bloqueadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se realiza el procedimiento?

El procedimiento se programará durante la primera mitad del ciclo menstrual, antes de la ovulación, con el fin de disminuir la posibilidad de que el procedimiento se realice cuando podría estar embarazada sin saberlo.

¿Es molesto el procedimiento?

Es posible que sienta dolores uterinos leves o moderados durante el procedimiento.

¿Se me dará algo para aliviar las posibles molestias?

Su médico podría recomendarle que tome los medicamentos que usa para aliviar los dolores menstruales y, de esa manera, la molestia disminuirá.

¿Cuándo puedo esperar conocer los resultados del procedimiento?

Conocerá los resultados durante el procedimiento o inmediatamente después de él.

¿Puedo quedar embarazada aun si tengo las trompas bloqueadas?

Aun si tiene las trompas bloqueadas, existen maneras de resolver este problema y quedar embarazada. Consulte a su médico para recibir recomendaciones y conocer los posibles próximos pasos que puede seguir.

femVue

¿No puede quedar embarazada?

¿Son las trompas el problema?



FemVue es una prueba de diagnóstico que sirve para examinar las trompas de Falopio.

www.MyFemVue.com

¿Por qué debería examinarme las trompas?

Aproximadamente, 1 de cada 3 mujeres no fértiles tiene las trompas de Falopio bloqueadas.¹

Factores que pueden dar como resultado el bloqueo de las trompas:

- Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) previa
- Enfermedades de transmisión sexual (ETS)
- Infección abdominal
- Cirugía previa
- Embarazo ectópico previo
- Endometriosis
- Causas desconocidas

La mayoría de las mujeres con las trompas bloqueadas no tienen síntomas. La única manera de saber si este es el motivo por el que no puede quedar embarazada es examinando las trompas.



Según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (American Society for Reproductive Medicine, ASRM), la enfermedad de las trompas es una importante causa de infertilidad y debe excluirse específicamente.²

¹Volpi, E. et al. (1996). Transvaginal sonographic tubal patency testing. UOG, 7(1), 43-48. doi:10.1046/j.1469-0705.1996.07010043.x

²The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Optimal evaluation of the infertile female. Fertility and Sterility. 2015;103:e47.

FemVue la acerca un paso más

FemVue es un dispositivo revolucionario que le permite a su médico examinar las trompas en el consultorio, con una ecografía, en lugar de derivarla a un radiólogo.

FemVue...



Es seguro:

- Crea burbujas naturales
- No necesita exposición a la radiación
- No necesita radiografía con contraste a base de yodo



Ahorra tiempo:

- Procedimiento rápido en el consultorio
- Resultados en tiempo real
- Planificación inmediata de próximos pasos



Es económico:

- Más barato que un examen radiológico
- Menores costos generales



Es conveniente:

- En el consultorio de su médico
- Una única visita



Obtenga las respuestas que está buscando de su médico **conocido y de confianza.**